

Melhores Práticas para Armazenamento



Carestream Dental Processamento de Produtos Químico

(Número de referência do produto 6850051 / 6850069)

Siga estas práticas recomendadas depois de abrir a garrafa:

- Feche a tampa firmemente durante o uso
- Armazene entre 5-20 ° C. Quanto menor a temperatura, menor a taxa de oxidação.
- Nunca agite o frasco.
- Use volumes baixos o mais rápido possível. Quanto menor o volume na garrafa, mais suscetível a solução é a oxidação.

Nota: Os fotoquímicos oxidam naturalmente. Além disso, temperaturas quentes e a quantidade de oxigênio introduzida podem fazer com que o produto pereça mais rapidamente.

Não há problema em usar um químico amarelo. Ainda vai funcionar muito bem.

Fechado, o produto terá um prazo de validade longo por data de validade listada.

Para mais informações entre em contato sac@carestream.com ou visite carestream.com.